



Fachinformation **durimplant**

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de

Bezeichnung

durimplant
Implantat-Pflege-Gel
Lang anhaltender Schutz des Zahnimplantats durch wirksame Zahnfleischpflege

Bestandteile

GELATUM BASALIS HYDROPHOBICUM, HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE, SILICA (Nano), ALLANTOIN, SALVIA LAVANDULIFOLIA, MENTHA PIPERITA, THYMOL, AQUA, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, CHLORHEXIDINE DIACETATE, ASPARTAME, LINALOOL, LIMONENE
Enthält eine Phenylalaninquelle.

Anwendungsgebiete und Eigenschaften

durimplant dient zur Pflege von Zahnfleisch und Mundschleimhaut sowie zur Vorbeugung von Entzündungen in der Umgebung von Zahnimplantaten (z.B. Periimplantitis). Das viskose, standfeste Gel haftet sehr gut auf Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Nach dem Auftragen auf das Gewebe - beispielsweise um neue Zahnimplantate - bildet es eine dünne, weiche Schutzschicht, die Salbei und Allantoin enthält.

durimplant ist wasserabweisend und verbleibt somit leicht auf dem Gewebe.

Zahnfleisch und Mundschleimhaut werden gepflegt. Einer Entzündung wird vorgebeugt.

durimplant kann auch bei allen leichten Entzündungen, Irritationen und Druckstellen im Mund- und Rachenraum zur milden Pflege der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches und damit zur Unterstützung der natürlichen Wundheilung und Geweberegeneration eingesetzt werden.

Als lang anhaltender Film dient es zusätzlich dem Schutz vor chemischen und mechanischen Reizen.

Art der Anwendung

In der Zahnarztpraxis:

Das viskose Gel in der benötigten Menge rund um das Implantat auf das leicht feuchte Zahnfleisch oder auf die zu behandelnde Stelle mit einem geeigneten Instrument in dünner Schicht auftragen. Das Gel kann bei Bedarf auch etwas intensiver in das Zahnfleisch / die Mundschleimhaut einmassiert werden.

Zu Hause und unterwegs:

Das Gel auf die saubere Fingerkuppe, ein Wattestäbchen oder ein anderes geeignetes Instrument in etwa linsen- bis erbsengroßer Menge aufbringen und danach auf das feuchte Zahnfleisch um das Implantat herum oder auf die zu behandelnde Stelle auftragen. Anschließend kann die Oberfläche noch leicht mit dem speichelfeuchten Finger geglättet und angepasst oder das Gel in das Zahnfleisch / die Mundschleimhaut einmassiert werden.

Zur Zahnfleischpflege einmal wöchentlich bis einmal täglich nach dem letzten Zähneputzen auftragen.

Bei Bedarf kann *durimplant* in Absprache mit der behandelnden Zahnarztpraxis auch mehrmals täglich angewandt werden.

Hinweis

Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe soll *durimplant* nicht angewendet werden.

Haltbarkeit

Das Produkt sollte nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr angewendet werden.

Darreichungsform und Packungsgröße

10 ml Gel in der Tube
PZN: 04999590

Stand der Information

Februar 2020

Weitere Informationen über www.legeartis.de